

Användarinstruktion

Oscar Provtagningsstol 072



Innehållsförteckning

Allmän beskrivning	3
Artikelöversikt	3
Innan du börjar	3
Säkerhetsinstruktioner	3
Innan provtagningsstolen används	3
Handhavande	4
Kvarvarande risker	4
Renhållning och underhåll	4
Serviceinstruktioner	5
Byte av gasfjädrer för höj- och sänkning av rygg	5
Garantivillkor	5
Kontakt	5
Teknisk information	6
EG-försäkran om överensstämmelse	7

Allmän beskrivning

Oscar provtagningsstol är avsedd för användning av sjukvårdspersonal vid provtagning. Stolen skall enbart användas av utbildad personal som är väl förtrogen med innehållet i denna bruksanvisning.

Stolen är fast i höjden, manuellt justerbar rygg samt lättjusterade armskenor.

Maximal patientvikt är 165 kg. Alla genomgående hål är förstärkta med fastsvetsade hylsor vilket minskar slitage och gör stolen stabil. Produkten är CE märkt.

Garantitiden är två år och gäller funktionsfel som uppkommer under garantitiden. Garantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens användningsområde samt yttre åverkan och yttre slitage

Artikelöversikt

Artikelnummer	Benämning
2-072	Provtagningsstol 072, fast höjd, manuellt justerbar rygg. Inklusive armskenor lång modell.
2-420	Kulfunktion till armskena (tillval)

Innan du börjar

Läs denna användarinstruktion innan du installerar och använder produkten!



Generell information

Säkerhetsinstruktioner

1. Maximal patientvikt är 165 kg.
2. Statisk belastning är 450 kg.
3. För transport av stolen, var noga med att emballera på nytt för att minimera risker att skada klädsel.

Innan provtagningsstolen används

1. Använd inga vassa föremål vid borttag av emballage då klädsel kan ta skada.
2. Tag bort skyddspappen från stolen.
3. Tag bort bubbelplast från stolen.
4. Ställ stolen på plats.
5. Torka rent synliga delar med en fuktig trasa.

Handhavande

Justering av rygg med en gasfjäder

Tryck in handtaget som är placerat bakom stolens rygg och pressa ryggen neråt för att uppnå önskad vinkel. För att höja ryggstödet, tryck in handtaget och för ryggstödet uppåt, släpp vid önskat läge.

Chockläge

Vid justering av rygg följer vadplattan automatiskt med upp varvid att liggande läge alternativt chockläge uppnås.

Armskenorna

Justeras upp och ned genom att frigöra den lilla svarta spaken vid fästet av armskenan.

Armskenorna går att vinkla upp och ned och görs genom att trycka in det lilla handtaget som är placerat under armskenan. När önskat läge är uppnått, släpp handtaget.

Patientknoppar

Finns till för att underlätta i- och urstigning. Vid insteg från sidan går dessa att ta bort. Vrid det svarta vredet som är placerat under patientknoppen och förflytta sedan samtidigt handtaget bort från stolen.

Kvarvarande risker



- Felaktig användning av produkten kan leda till personskada.
- Patient får inte sitta på annat ställe än sitsen. Risk för att stolen välter.
- Maximal patientvikt får inte överskridas, risk för skada på stolen.
- Klämrisk kvarstår på vissa delar mellan sits och vadplatta vid förflyttning.

Renhållning och underhåll

- Rengör synliga delar med en fuktig trasa.
- Använd sjukvårdens vanligaste förekommande rengöringsmedel.
- Torka rent med en torr trasa.
- Användning av desinfektionsmedel kan torka ut klädsel på stolen, använd av säkerhetsskäl ett svagt desinfektionsmedel.
- Rengör inte stolen genom att hälla vatten på den.

Serviceinstruktioner



Byte av gasfjäder för höj-/sänkning av rygg

1. Tag loss nedre fästet, M8 bult.
2. Tag loss 17 mm muttern högst upp på kolvstången (kontramutter).
3. Tag ur M8 bult ur kolvstången.
4. Roter stången medsols.
5. Montera i omvänd ordning.

Garantivillkor

I samband med upptäckt av fel skall slutkund utan dröjsmål kontakta Oscar Medtec AB eller återförsäljare/installatör för att påtala felet och beskriva problemet. Om köpt via återförsäljare/installatör skall denne i sin tur kontakta Oscar Medtec AB för att beskriva problemet.

Reklamation till Oscar Medtec AB skall göras omgående. Vidare måste följande garantiinformation för produkten anges:

- Serienummer
- Typ av produkt och artikelnummer
- Inköpsdatum och fakturanummer

Garantin omfattar inte fel som förorsakats av

- Transport
- Användarens oaktsamhet eller överbelastning
- Köparens/användarens underlåtande att följa bruksanvisningen
- Reparationer eller förändringar i konstruktionen som utförts av annan än av tillverkaren godkänt serviceföretag

Garantin täcker inte heller

- Obetydliga fel såsom reparation av ytrisor och som inte inverkar på stolens funktion.

Besiktning som utförs av återförsäljare eller representant från Oscar Medtec AB i samband med reklamation debiteras kunden om inga felaktigheter som omfattas av garantin finns.

Kontakt

Oscar Medtec AB, Arntorpsgatan 24, 442 45 Kungälv
Telefon: 0303-170 50, Fax: 0303-130 50, Email: info@oscardmedtec.se

Teknisk information

Artikel		2-072
Patientvikt 165 kg		•
Bredd utan armskenor (680 mm)		•
Bredd med armskenor (900 mm)		•
Sitthöjd maximal 695 (mm)		•
Längd fälld 1670 (mm)		•
Chockläge 7 (°)		•
Strömkabel		•
Gasfjäder rygg 270N	8-835	•
Underrede (460 mm x 630 mm)		•
EN 12100 Maskinsäkerhet-Allmänna konstruktionsprinciper		•
• standard /o tillval/ - inte tillgängligt		

EG-försäkran om överensstämmelse

Denna försäkran om överensstämmelse är i enlighet med:
MDD (Direktiv för medicintekniska produkter) 93/42 EEG



Försäkrar härmed att:

Provtagningsstol 072

.....
Modellnummer

Oscar Medtec AB

.....
Tillverkare

Produkten;

1. Uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskrav på konstruktion och tillverkning av maskiner och säkerhetskomponenter som ställs i rubricerade direktiv under förutsättning att de installeras i enligt medlevererad instruktion. Om ändringar görs på produkten blir denna försäkran ogiltig.
2. Är konstruerad och tillverkad enligt följande standarder som omnämns nedan.

Produkt

ISO 13854:1994

Safety of machinery – Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN ISO 12100:2010

Maskinsäkerhet – Allmänna konstruktionsprinciper

Tillverkningsansvarig

Kungälv 2016-06-20

Ort & Datum

Signatur 

VD Oscar Medtec AB

Ställning