

# Användarinstruktion

## Oscar Öronstol 430



## Innehållsförteckning

<b>Allmän beskrivning</b> .....	<b>3</b>
<b>Artikelöversikt</b> .....	<b>3</b>
<b>Innan du börjar</b> .....	<b>4</b>
Säkerhetsinstruktioner .....	4
Innan öronstolen används .....	4
<b>Handhavande</b> .....	<b>5</b>
Kvarvarande risker .....	5
<b>Renhållning och underhåll</b> .....	<b>5</b>
<b>Serviceinstruktioner</b> .....	<b>6</b>
Felsökning av motor .....	6
Byte av pelare för höj- och sänkning .....	6
Byte av broms .....	6
Byte av ryggmotor .....	6
Byte av fotreglage .....	6
<b>Garantivillkor</b> .....	<b>7</b>
<b>Kontakt</b> .....	<b>7</b>
<b>EG-försäkran om överensstämmelse</b> .....	<b>9</b>

## Allmän beskrivning

Oscar Öronstol är avsedd för användning av sjukvårdspersonal vid undersökning. Stolen skall enbart användas av utbildad personal som är väl förtrogen med innehållet i denna bruksanvisning.

Stolen är utrustad med två motorer som reglerar, elektrisk- höj-/sänkning samt elektrisk justerbar rygg. Ställbart nackstöd samt armstöd. Stolen går att rotera 360° runt sin egen axel för att underlätta undersökning/behandling i andra örat. Styrning av motorerna sker med hjälp av fotreglage.

Stolen är utrustad med Quick-release (snabb frikoppling) vilket innebär att det sitter en spak vid sidan av stolen och ett handtag på stolens rygg som gör det snabbt att fälla patienten i chockläge.

Stolen är utrustad med ett stabilt fotstöd som standard. Patienten kan ställa sig på fotstödet utan att stolen tippar, vilket underlättar vid insteg. Vid fällning av rygg följer fotstödet med för att göra plats för patientens ben

Maximal patientvikt är 200 kg. Alla genomgående hål är förstärkta med fastsvetsade hylsor vilket minskar slitage och gör stolen stabil. Öronstolen stör ej andra apparater eller kan heller inte störas av annan utrustning. Produkten är CE märkt.

Garantitiden är två år och gäller funktionsfel som uppkommer under garantitiden. Garantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens användningsområde samt yttre åverkan och yttre slitage.

## Artikelöversikt

Artikelnummer	Benämning
3-420	Öronstol 430, elektrisk höj- och sänkbar, elektrisk justerbar rygg. Roterbar 360 ° med elbroms.

## Innan du börjar

**Läs denna användarinstruktion innan du installerar och använder produkten!**



### Generell information

### Säkerhetsinstruktioner

1. Drag, böj eller skada aldrig strömkabeln.
2. Använd aldrig en strömkabel som är trasig eller dålig. Om strömkabeln är skadad ska denna bytas ut av behörig personal alternativt av tillverkaren.
3. Anslut alltid strömkabeln till jordat ström uttag.
4. Drag alltid ut strömkabeln vid reparation och installation.
5. Maximal patientvikt är 200 kg.
6. För transport av stolen, var noga med att emballera på nytt för att minimera risker att skada klädsel.
7. För transport av stolen, var noga med att låsa rotationen med hjälp av tex. Ett snöre.

### Innan öronstolen används

1. Använd inga vassa föremål vid borttag av emballage då klädsel kan ta skada.
2. Tag bort skyddspappen från stolen.
3. Tag bort bubbelplast från stolen.
4. Ställ stolen på plats.
5. Tag bort transportsäkring för rotering av patient innan användning. Denna sitter på baksidan av stolen och är uppmärkt.
6. Anslut strömkabeln i vägguttaget.
7. Torka rent synliga delar med en fuktig trasa.

## Handhavande

Oscar öronstol går rakt upp och rakt ner vid höjning och sänkning.

Elektrisk höj- och sänkning med en (1) motor  
Skер med fotreglage märkt med pilar upp och ner.

Justering av rygg med en (1) motor  
Skер med fotreglage märkt med pilar upp och ner.

### Chockläge

Vid justering av chockläge följer vadplattan automatiskt med upp varvid att liggande läge alternativt chockläge uppnås.

### Rotation

Skер med fotreglage märkt broms.  
Observera att låsning av broms upphör vid strömavbrott.

### Armstöden

För att lyfta bort armstöden, frigör den svarta spaken som sitter på bakre delen av armstödet. Drag sedan ner den kromade knappen som är placerad under armstödet och drag samtidigt armstödet ut från stolen.

### Nackstöd

För justering av nackstödet, frigör den svarta spaken bakom nackstödet och reglera. Drag åt vid önskat läge.

### Quick-Release

Tryck ner det röda handtaget och fäll samtidigt ryggen.

## Kvarvarande risker

- Felaktig användning av produkten kan leda till personskada.
- Patient får inte sitta på annat ställe än sitsen. Risk för att stol välter
- Maximal patientvikt får inte överskridas, risk för skada på stolen.
- Klämrisk kvarstår på vissa delar mellan sits och vadplatta vid förflyttning.
- Klämrisk av finger kan uppstå under armstöd vid rörliga delar.



## Renhållning och underhåll

- Rengör synliga delar med en fuktig trasa.
- Använd sjukvårdens vanligaste förekommande rengöringsmedel.
- Torka rent med en torr trasa.
- Användning av desinfektionsmedel kan torka ut klädsel på stolen, använd av säkerhetsskäl ett svagt desinfektionsmedel. Eftertorka med fuktig trasa.
- Rengör inte stolen genom att hälla vatten på den.
- Stolen är utrustad med strömkablar, kontrollera att dessa är hela. Använd aldrig kablar som är trasiga eller dåliga. Om strömkablar är skadade ska dessa bytas ut av behörig personal alternativt av tillverkaren.

## Serviceinstruktioner



**Drag alltid ut nätsladden vid reparation och underhåll!  
Om nätsladden skadats skall den bytas ut. Ny finns att köpa hos leverantören.**

### Felsökning av motor

1. Om stolen eller ryggen har stannat helt kan pelarens eller motorns överhettningsskydd ha utlösts. Vänta 10-15 minuter och starta igen.
2. Kontrollera att alla sladdar är hela och anslutna.
3. Skulle stolen fortfarande inte fungera efter egenkontroll av anslutningssladdar kontakta Oscar Medtec AB för teknisk support.

### Byte av pelare för höj- och sänkning

1. Kontakta Oscar Medtec AB, 0303-23 31 60.

### Byte av broms

1. Kontakta Oscar Medtec AB, 0303-23 31 60.

### Byte av ryggmotor

2. Kontakta Oscar Medtec AB, 0303-23 31 60.

### Byte av fotreglage

1. Kontakta Oscar Medtec AB, 0303-23 31 60.

## Garantivillkor

I samband med upptäckt av fel skall slutkund utan dröjsmål kontakta Oscar Medtec AB eller återförsäljare/installatör för att påtala felet och beskriva problemet. Om köpt via återförsäljare/installatör skall denne i sin tur kontakta Oscar Medtec AB för att beskriva problemet.

Reklamation till Oscar Medtec AB skall göras omgående. Vidare måste följande garantiinformation för produkten anges:

- Serienummer
- Typ av produkt och artikelnummer
- Inköpsdatum och fakturanummer

Garantin omfattar inte fel som förorsakats av

- Transport
- Användarens oaktsamhet eller överbelastning
- Köparens/användarens underlåtande att följa bruksanvisningen
- Växlingar i spänningen (får vara högst  $\pm 10\%$ )
- Åskväder
- Reparationer eller förändringar i konstruktionen som utförts av annan än av tillverkaren godkänt serviceföretag

Garantin täcker inte heller

- Obetydliga fel såsom reparation av ytrisor och som inte inverkar på stolens funktion.

Besiktning som utförs av återförsäljare eller representant från Oscar Medtec AB i samband med reklamation debiteras kunden om inga felaktigheter som omfattas av garantin finns.

## Kontakt

Oscar Medtec AB, Arntorpsgatan 24, 442 45 Kungälv  
Telefon: 0303-170 50, Fax: 0303-130 50, Email: [info@oscarmedtec.se](mailto:info@oscarmedtec.se)

## EG-försäkran om överensstämmelse

Denna försäkran om överensstämmelse är i enlighet med:  
MDD (Direktivet för medicintekniska produkter) 93/42/EEG



### Försäkrar härmed att:

Öronstol 430

.....  
Modellnummer

Oscar Medtec AB

.....  
Tillverkare

### Produkten;

1. Uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskrav på konstruktion och tillverkning av maskiner och säkerhetskomponenter som ställs i rubricerade direktiv under förutsättning att de installeras i enligt medlevererad instruktion. Om ändringar görs på produkten blir denna försäkran ogiltig.
2. Är konstruerad och tillverkad enligt följande standarder som omnämns nedan.

#### Magnet

DIN VDE 0580  
SS EN 60529

Electromagnetic devices and components  
Kapslingsklasser för elektrisk material (IP-beteckning)

#### Släpning

EN 61000-6-1, 3  
EN 61000-3-2, 3

Elektromagnetisk kompatibilitet – generella fordringar  
Elektromagnetisk kompatibilitet - Gränsvärden

#### Motorer

EN 12100  
EN 60601-1  
EN 61000-6-1-4

Maskinsäkerhet – Allmänna konstruktionsprinciper  
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Del 1  
Elektromagnetisk kompatibilitet – Generella fordringar

#### Produkt

EN 60601-1

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Del 1 (enbart valda delar)

---

Tillverkningsansvarig

Kungälv 2019-06-20

Ort & Datum .....

Signatur .....  


VD Oscar Medtec AB

Ställning .....